


## Maske Takma Talimatları

Solunum koruyucu maskeye dokunmadan önce ellerinizi sabun ve su ile iyice yıkayın veya el dezenfektanı kullanın.

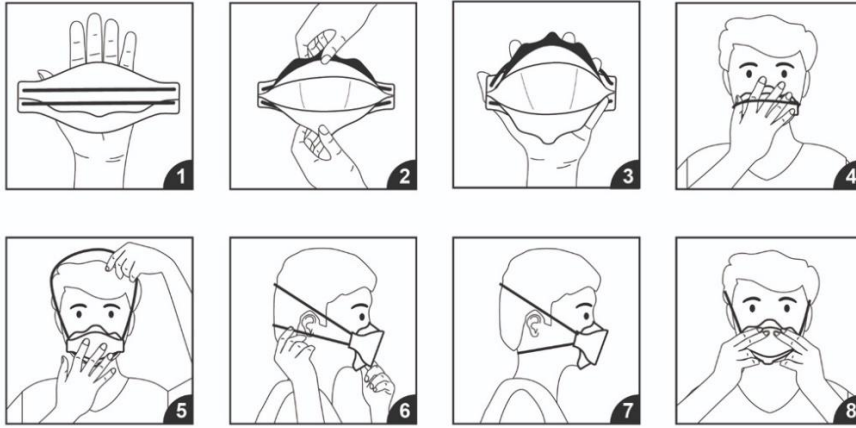

- 1) Solunum koruyucu maskeyi ambalajından çıkarın ve baş kayışlarının yukarıya bakacak şekilde tutun.
- 2) Üst ve alt panelleri tamamen açın, burun süngerini merkezde tutarak, avuç içinizde her iki taraftan hafifçe bükün. Paneller açıldığında dar dokuma şeritleri ayrı olmalıdır. Alt panelin tamamen açıldığından emin olun.
- 3) Solunum koruyucu maskeyi elinizin avuç içine yerleştirin ve hafifçe sıkarak bir konik şekline getirin, üst baş kayışı elinizin arka tarafında konumlanmalıdır.
- 4) Şekillendirilmiş solunum koruyucu maskeyi yüzünüze yerleştirin.
- 5) Şekillendirilmiş solunum koruyucu maske yüzünüzdeyken, üst baş kayışını başınızın arkasına çekin.
- 6) Alt paneli çenenizin altına çekerken, alt baş kayışını boynunuzun arkasına çekin.
- 7) Solunum koruyucu maske şekilde görüldüğü gibi yerleştirilmelidir.
- 8) Her iki elinizle de burun telinin üst kısmına iki adet parmak uçlarınızı yerleştirin. İki elinizi kullanarak parmak uçlarınızı içeri doğru iterek burun telini burnunuzun şekline uygun hale getirin.

## Uygunluk Kontrolü

- Solunum koruyucu maskenin önünü her iki elinizle kapatın, solunum koruyucu maskenin yerleşimini bozmadığınızdan emin olun.
- Valfli modellerde derin nefes alarak, valfsiz modellerde kuvvetli nefes vererek kontrol edin.
- Eğer hava, solunum koruyucu maskenin kenarlarından sızarsa, panelleri ve dar dokuma şeritlerini tekrardan ayarlayın.
- Yüzünüze doğru ve güvenli bir şekilde maskeyi yerleştiremezseniz, solunum açısından tehlikeli partikül içeren çalışma ortamına girmeyiniz.