


Maske Takma Talimatları

Solunum koruyucu maskeyi kullanmadan önce ellerinizi sabun ve su ile iyice yıkayın veya el dezenfektanı kullanın.

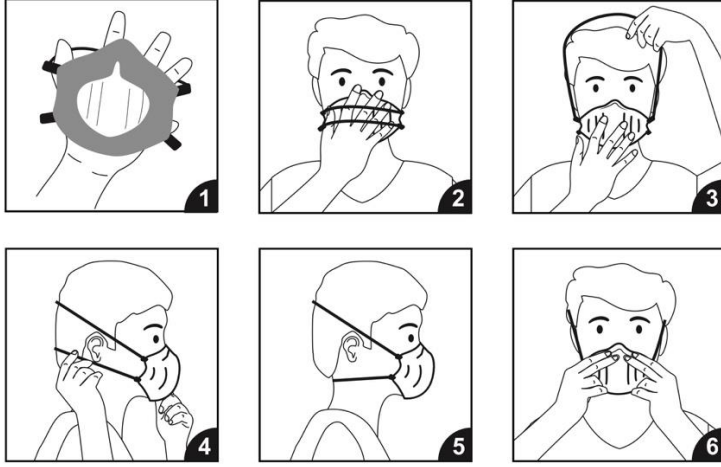

Takma Talimatları

- 1) Solunum koruyucu maskeyi ambalajından çıkarın ve baş kayışları yukarı bakacak şekilde avuç içinize alın. Üst baş kayışı elinizin arka tarafında olacak şekilde hafifçe sıkın.
- 2) Şekillendirilmiş solunum koruyucu maskeyi yüzünüze yerleştirin.
- 3) Solunum koruyucu maskeyi yüzünüzde tutarken, üst baş kayışını başınızın arkasına çekin. Modelde toka varsa:
 - Kayış gerginliğini artırmak için, üst/alt kayışların her iki ucunu eşit şekilde çekin.
 - Kayış gerginliğini azaltmak için, solunum koruyucu maskeyi çıkarmadan tokaların arkasına doğru iterek kayışı gevşetin.
- 4) Alt baş kayışını boynunuzun arkasına çekin ve alt paneli çenenizin altına yerleştirin.
- 5) Solunum koruyucu maskeyi şekilde görüldüğü gibi yerleştirilmelidir.
- 6) Her iki elinizin parmak uçlarını burun şeridinin üst kısmına yerleştirin. İki elinizi kullanarak, burun şeridini burnunuzun şekline göre parmak uçlarınızla içeri doğru bastırarak kalıplayın.

Uygunluk Kontrolü

- Solunum koruyucu maskenin ön kısmını her iki elinizle kapatın, Solunum koruyucu maskenin uyumunu bozmamaya dikkat edin.
- Valfsiz solunum cihazı: Keskin bir şekilde nefes verin.
- Valfli solunum cihazı: Keskin bir şekilde nefes alın.
- Eğer burun çevresinden hava sızıyorsa, burun klipsini tekrar ayarlayarak sızıntıyı giderin.
- Eğer solunum koruyucu maskenin kenarlarından hava sızıyorsa, kayışları başınızın yanları boyunca geri çekerek sızıntıyı giderin.
- Yüzünüze doğru ve güvenli bir şekilde maskeyi yerleştiremezseniz, solunum açısından tehlikeli partikül içeren çalışma ortamına girmeyiniz.